

# Boîte de lingettes nettoyantes désinfectantes ASEPTONET



**Boîte de 100 lingettes nettoyantes désinfectantes pour les surfaces, le petit matériel et les dispositifs médicaux non-invasifs.**

---

## **Conditionnement**

Format de lingette : 130 x 200mm

Boîte de 100 lingettes

Carton de 12 boîtes

## **Actifs**

Ethanol, Isopropanol, Chlorure de benzalkonium, Trideceth –7.

## **Propriétés microbiologiques**

En conditions de saleté (sauf \*)

- Bactéricide EN1040, EN1276, EN13697, EN14561 (dont SARM) en 5 min.
- Tuberculocide sur Mycobacterium Terraе EN14348 et EN14563 en 15mn\*.
- Fongicide sur Aspergillus Niger EN1275, EN13697, EN14562(\*) en 5 min.
- Levuricide sur Candida albicans EN1275, EN1650, EN13697, EN13624\*, EN14562 (\*) en 5 min.
- Virucide\* EN14476 sur l'Herpès Simplex Virus (HSV) en 5 min, Coronavirus, Influenza A (H1N1), HBC, HCV, Adenovirus, VRS, Polyomavirus, Norovirus en 1 min, Rotavirus en 15mn.

## **Mode d'emploi**

Soulever le couvercle et retirer l'opercule d'étanchéité. Insérer ensuite la lingette centrale à l'intérieur du capot. Produit prêt à l'emploi à usage unique. Le rinçage est inutile, sauf si le dispositif médical est susceptible d'être en contact avec les muqueuses.

Bien refermer le couvercle après utilisation.

Sèche rapidement et ne laisse aucun résidu.

Laisser agir entre 1 et 15 minutes selon l'efficacité antimicrobienne recherchée.

## **Précautions d'emploi**

Consulter la fiche de données de sécurité au préalable.

Tolérance cutanée testée sous contrôle dermatologique.



Réf : ASEP0001 - Code formule 998 077

---

Fiche Technique. Version 7- 12/2013

STERIDIS - ZAC de la Blanche Tâche - 80450 CAMON

Tél : 03 22 09 41 39 - Fax : 03 22 50 01 34 - mail : [contact@steridis.com](mailto:contact@steridis.com)